

Korekcinų akinių naudojimo instrukcija

(Gamintojas: UAB „OC VISION Lietuva“ Gedimino pr. 3A-102, Vilnius)

Tam, kad savo turimais akiniais galėtumėte džiaugtis ilgai, juos būtina tinkamai prižiūrėti. OPTIO optikos specialistai dalinasi patarimais, kaip tinkamai pasirūpinti savo akiniais.

- Akinius būtina naudoti pagal paskirtį ir vadovautis akinių priežiūros taisyklėmis.
- Korekciniai akiniai yra laikomi medicinos priemone, yra gaminami individualiai, pagal konkrečiam asmeniui išrašytą akinių receptą ar akinių skyrimo kortelę, ir yra skirti nešioti taip, kaip nurodė optometrininkas ar gydytojas oftalmologas. Neleiskite Jums pagamintų korekcinų akinių nešioti kitiems asmenims, saugokite nuo mažų vaikų.
- Akiniai turi būti tinkamai prigludę, nesmukčioti. Nenešiodami akinių ant kaktos, viršugalvio ar kitaip - tai gali pažeisti akinių rėmelių geometriją.
- Nešiodami tik Jums skirtus akinius, pagamintus optikos salone.
- Nusiimkite ir užsidėkite akinius abiem rankomis, kad neišsikreiptų rėmeliai.
- Saugokite akinius nuo mechaninių pažeidimų. Nenešiodami akinių, laikykite juos specialiame dėkle. Akinių negalima dėti akinių lęšiais į apačią, nes jie gali susibraizyti. Nenešiodami akinių be dėklo kišenėje ar rankinėje.
- Akinius valykite tik specialiomis priežiūros priemonėmis – akinių valymo šluostėmis ir lęšiams valyti skirtu valikliu. Atkreipkite dėmesį į akinių valymo šluostės būklę ir valiklio galiojimo laiką, naudokite tik geros būklės priemones.
- Nusiimkite akinius prieš purkšdami plaukų laką ar kvepalus. Venkite tiesioginio kontakto su cheminėmis medžiagomis.
- Venkite didelio tiesioginio karščio ir temperatūrų skirtumų (pavyzdžiui, saulėtą dieną nepalikite akinių automobilyje, dėvėdami akinius neatidarykite karštos orkaitės durelių).
- Reguliariai patikrinkite, ar tinkama akinių forma ir nešiojimo padėtis.
- Rekomenduojame kartą per metus atlikti profilaktinę priežiūrą arba ultragarsinį akinių valymą.
- Nerekomenduojame patiems atlikti akinių remonto ar reguliavimo – dėl akinių tvarkymo kreipkitės į OPTIO optikų personalą. Optikų kontaktus ir darbo laikus rasite www.optio.lt

Korekcinų akinių naudojimo instrukcijos vėliausias atnaujinimas: 2025 08 07.

PATVIRTINTA UAB „OC VISION Lietuva“ gen. direktoriaus 2025-08-07 įsakymu Nr. 25/08-07